

浴槽台(EEX-RE317L-2)組立説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの組立説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。下記の要領でご使用ください。

1.使用上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品をホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品の上で飛び跳ねたり、勢いよく乗らないでください。
- 平らで安定した場所に設置してください。天板に端に乗らないでください。
- 使用者が自分の体を十分に安定させられない場合は、介助者が付き添ってください。
- 追い焚き付き給湯器や直焚き浴槽、お湯が循環している浴槽で使用する場合は、湯沸かしが完了してから設置してください。
- ツルツルした小さいタイルが埋め込まれた洗い場や床では使用しないでください。
- 使用後は浴槽から取出してください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
柔らかい布やスポンジに、薄めた中性洗剤を含ませて汚れを取り、きれいな水で洗い流してください。

2.セット内容




3.組立て方法

①座面の裏側に脚を取付けます。

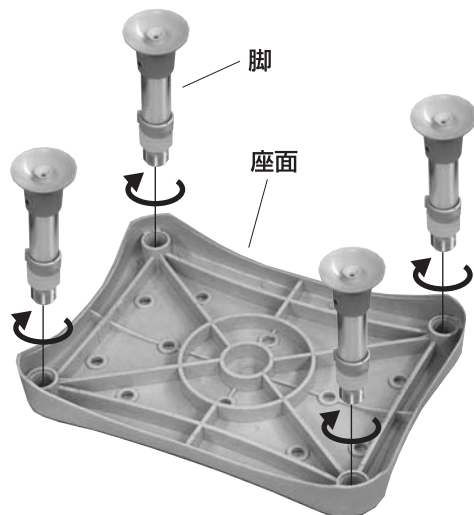

②脚の吸盤(いずれか2ヶ所)にチェーンを取付けて完成です。

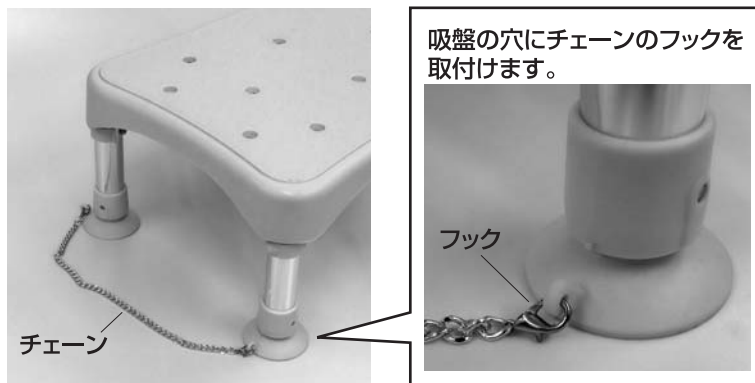

※チェーンを引っ張ると吸盤を床から取外すことができます。

※フックなどにチェーンを引っ掛けて製品をぶら下げないでください。
吸盤が変形して、床に吸着しなくなる恐れがあります。

4.高さの調節方法

①脚からロックピンを取外します。



②脚の長さを調節し、ロックピンを差込みます。



※脚は全て同じ高さにしてください。

※一番低い高さ(全高18cm)にする場合、ピンが入らない場合があります。一度、足を緩めてピンを入れてから足を固定してください。